

POUR LA DÉTECTION PRÉCOCE DE L'HÉMATURIE CHEZ LES CHATS


Blücare Hématurie aide à détecter les traces de sang dans l'urine de votre chat. Il se présente sous forme de petits granules blancs faciles à saupoudrer sur la litière de votre chat.

INDICATIONS

Recommandé pour la détection précoce de sang dans l'urine dès le stade de la microhématurie (du sang urinaire invisible à l'œil nu). La présence de sang dans l'urine est fortement associée aux troubles urinaires chez le chat, notamment aux cystites idiopathiques félines, aux urolithiases et aux infections urinaires.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Débutez avec de la nouvelle litière propre et agglomérante à base d'argile.
- 2 Répartissez uniformément un sac de granules Blücare sur la litière.
- 3 Retirez chaque jour les agglomérats d'urine et les selles avec une pelle à litière. Observez les granules qui sont entrés en contact avec l'urine de votre chat.
 - a) S'ils sont BLANCS ou JAUNES, le test est négatif pour la détection de sang dans l'urine.
 - b) S'ils sont BLEUS, le test est positif : Blücare a détecté du sang dans l'urine de votre chat. Communiquez avec votre vétérinaire.
 - c) Si vous êtes INCERTAIN de la couleur des granules, retirez tous les granules souillés de la litière et remplacez-les par de nouveaux granules (si nécessaire). Dans les 24 à 48 heures qui suivent, soyez attentif au comportement de votre chat et à la couleur des nouveaux granules Blücare souillés par l'urine de votre chat. Si vous demeurez incertain quant à la couleur des granules, ou si vous avez le moindre doute sur le comportement ou l'état de santé de votre chat, communiquez avec votre vétérinaire.

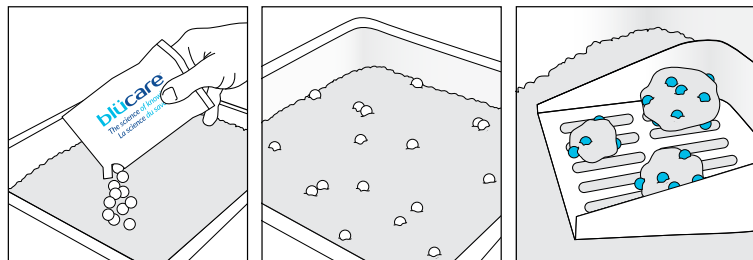

VEUILLEZ NOTER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- ▲ Blücare peut être utilisé avec la plupart des litières disponibles sur le marché. Pour favoriser une meilleure détection, il est préférable d'utiliser une litière agglomérante à base d'argile (bentonite).
- ▲ Un nettoyage (retrait des excréments) quotidien de la litière est fortement recommandé.
- ▲ Remplacez le contenu de la litière selon les indications du fabricant. Une fois saupoudrés sur la litière, les granules Blücare restent efficaces pendant une période de 30 jours.

POURQUOI UTILISER BLÜCARE HÉMATURIE ?

Par instinct, le chat n'expose pas ses vulnérabilités à de potentiels prédateurs ; s'il est malade, il va donc avoir tendance à cacher ses symptômes. Par conséquent, les propriétaires de chat ne remarquent pas toujours que leur animal a un problème de santé. Or, le chat est un habitué des troubles urinaires et les rechutes ne sont pas rares, même lorsqu'un traitement adéquat est mis en place. Il est donc utile d'avoir un outil de suivi de ces troubles urinaires. Le sang dans l'urine étant fortement associé à ces troubles, Blücare Hématurie offre un moyen de suivi de la santé du système urinaire de votre chat.

SOINS PRÉVENTIFS

Pour que votre chat demeure en bonne santé, assurez-vous de lui fournir suffisamment d'eau fraîche, ainsi qu'une alimentation équilibrée de qualité, appropriée à son stade de développement. Demandez conseil à votre vétérinaire. Assurez-vous aussi de permettre à votre chat d'évoluer dans un environnement adapté avec des jouets et plusieurs points d'observation.

COMPOSITION DE BLÜCARE HÉMATURIE

Les granules Blücare contiennent un réactif, le tétraméthylbenzidine (TMB), dont l'innocuité a été étudiée par des vétérinaires. Cette molécule permet le changement de couleur des granules, de blanc à bleu, au contact de globules rouges.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ▲ Lire attentivement le mode d'emploi avant d'effectuer le test, puisque les résultats ne peuvent être correctement interprétés que si les instructions et les recommandations ont été respectées.
- ▲ Usage unique.
- ▲ Ne pas utiliser si le sachet est ouvert ou endommagé.
- ▲ Toujours se laver les mains avec du savon après avoir versé et retiré les granules et après avoir nettoyé la litière.
- ▲ Pour usage externe seulement. Ne pas avaler.
- ▲ Tenir hors de la portée des enfants.
- ▲ Entreposer les granules dans un endroit sec à une température ambiante inférieure à 30 °C (86 °F).
- ▲ Les résultats du test peuvent être faussés, notamment si votre chat urine plusieurs fois sur les mêmes granules. Retirez bien les agglomérats et les excréments tous les jours.
- ▲ Si l'urine de votre chat contient très peu de globules rouges ou si la composition urinaire est hostile à la réaction enzymatique (pH élevé, densité urinaire extrême, etc.), les granules peuvent ne pas réagir et/ou la couleur bleue des granules Blücare pourrait disparaître avec le temps.
- ▲ Une utilisation ou une conservation faite en dehors des conditions indiquées ou le non-respect des limites d'utilisation peuvent entraîner des résultats faussés.

AVERTISSEMENTS

Blücare Hématurie est un produit qui peut détecter les traces de sang dans l'urine de votre chat. Des traces de sang dans l'urine peuvent être le symptôme d'un grave problème de santé. Si les granules deviennent bleus au contact de l'urine de votre chat et/ou que votre chat semble malade ou en détresse, consultez votre vétérinaire.

Les résultats du test peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et d'autres facteurs comme l'alimentation et la médication du chat. L'exactitude des résultats n'est pas garantie. Sous réserve des dispositions d'ordre public applicables, la responsabilité de Laboratoires Blücare inc., en ce qui concerne toute réclamation découlant du produit ou de son utilisation ou en relation avec le produit ou son utilisation, doit être limitée au prix payé à l'achat d'une unité du produit entraînant la réclamation.

blücare^{MD}
La science du savoir

Si vous avez des questions ou des commentaires, faites-nous parvenir un courriel à l'adresse customercare@blucarelab.com. Pour en savoir plus, visitez : blucarelab.com.